

# IDEXX VetLab Station

## 快速參考指南

有關使用 IDEXX VetLab\* Station 的更多信息 (例如為正在執行的檢測添加測試、重新分配結果和輸入 SNAP\* 測試結果)、請訪問 [idexx.com/product-info](https://idexx.com/product-info) 和/或 [learn.idexx.com](https://learn.idexx.com)。



## 首頁導覽

### 儀器狀態圖示

使用顏色編碼的圖示了解哪些儀器正在執行和/或可用。

- 綠色 (準備就緒) — 已連線並正在通訊
- 黃色 (忙碌/待機) — 使用中或待機模式
- 灰色 (離線) — 連線已中斷
- 紅色 (警示) — 發生問題 — 點選圖示以取得更多資訊

### 訊息中心


點選  以檢視來自 IDEXX 的通知。

### IDEXX SmartService 指示燈

點的顏色表示 IDEXX SmartService\* 解決方案連線狀態：

- 綠色 — 已連線
- 黃色 — 連線中
- 灰色 — 已停用
- 紅色 — 離線

### 齒輪圖示

點選  以開啟功能表、在此您可以進入特定儀器的畫面、自訂設定、取得說明、檢視訊息或關閉系統。

### 省略號 (...)

按一下「...」以顯示所有檢體清單或從待驗檢體清單中移除請求。

### 待驗檢體清單

查看哪些動物患者在您的整合診所資訊管理系統 (PIMS) 中提出檢驗需求。



### 搜尋和新增按鈕

點選 **搜尋** 可在待驗檢體清單中搜尋動物患者。點選 **新增** 以手動輸入動物患者資訊。

### 進行中區域

查看目前正在執行、等待執行或需要處理的檢測。


### 紀錄搜尋

搜尋動物患者紀錄。

### 檢驗結果

查看過去 7 天內的院內動物患者檢驗結果清單。點選動物患者並檢視或列印其檢驗結果。

## 使用整合的 PIMS 開始檢體檢測

1. 在首頁上、點選**待驗檢體**或**所有檢體**清單中的所需動物患者、或點選  以在**待驗檢體**清單中搜尋動物患者。
2. 選取所需的儀器、然後點選**執行**。

## 在 IDEXX VetLab Station 上直接開始檢體檢測

在首頁上點選 、然後：

如果是新動物患者：

1. 點選**新增新動物患者**、輸入動物患者/畜主資訊、然後點選**下一步**。
2. 確認/指定動物患者/診所資訊、選取所需的儀器、然後點選**執行**。

如果是現有動物患者：

1. 點選**動物患者**、**姓氏**或**畜主號碼**框、然後開始輸入相關資訊。點選以從清單中選取所需的動物患者、然後點選**下一步**。
2. 確認/指定動物患者/診所資訊、選取所需的儀器、然後點選**執行**。

如果是緊急情況動物患者：

1. 點選**急作**。
2. 選取**物種**和**成長階段**。系統會自動輸入唯一時間戳記來識別動物患者 (這可以在重新分配檢驗結果時使用)。
3. 點選**下一步**。
4. 選取所需的儀器、然後點選**執行**。

## 輸入/編輯手動 SNAP 檢測結果

輸入手動 SNAP 檢測結果：

1. 點選進行中區域的 **SNAP** 圖示、或在 SNAP 計時器完成對話方塊中點選**輸入結果**。
2. 點選與您的 SNAP 檢測結果視窗相符的影像。
3. (選擇性) 點選**附註**分頁、然後輸入使用者號碼和對此檢測結果的附註。
4. 點選**儲存**。

編輯 SNAP 檢測結果：

1. 在結果畫面中、點選**管理結果**。
2. 點選**編輯手動結果**、然後選取 SNAP 檢測結果進行編輯。
3. 進行變更並點選**儲存**。

## 輸入手動物理和化學尿液分析內容

在執行期間新增化學和物理尿液內容：


1. 開始執行尿液分析。
2. 提示選取所需的儀器圖示時、點選**手動尿液分析**圖示、然後選取檢體的收集方法、顏色和透明度。
3. 輸入檢體的比重。
4. 點選與檢體 pH 相符的顏色。
5. 如果所有化學檢查結果均正常、請點選**設定為全為陰性/正常**；否則、請指定適當的結果。(如果您只變更了一些結果、完成後請點選**下一步**。)
6. 輸入任何附註並點選**完成**。

若要編輯手動尿液分析內容：


1. 在結果畫面中、點選**管理結果**。
2. 點選**編輯手動結果**、然後選取手動尿液分析結果進行編輯。
3. 進行變更並點選**儲存**。

## 檢視與列印結果

1. 請執行以下任一動作：


- + 在首頁上點選檢驗結果清單中的動物患者。
- + 點選新結果警示訊息。
- + 在首頁上的檢驗結果中、點選  **記錄搜尋**、搜尋並選取所需的動物患者、然後點選**檢視**。

2. 點選包含所需結果的分頁。


3. 點選  以列印所選分頁中所有檢測結果的綜合性報告。

## 每週維護

IDEXX 建議您每週重新啟動系統。

1. 點選 、然後點選**斷電**。
2. 點選**斷電**或**重新啟動**。

## 自訂設定

您可以自訂 IDEXX VetLab Station 以滿足您的診所需求。點選 、然後點選**設定**。